


# Ablauf der Selbsttests:



fertig gerichtetes Ablagefach!

4 Teile auf gerichtetem Schüler-Ablagefach:

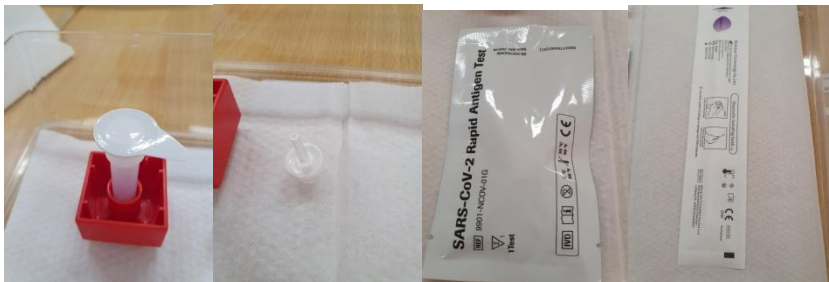

Fläschlein mit Test-  
Flüssigkeit im Duplo-  
Ständer  
(oder Knete,  
Wäscheklammer!)

neuer Deckel  
für das  
Fläschlein

Teststreifen,  
mit Trocken-  
päckchen (Müll)

langes Wattestäbchen,  
nur am dünnen Griff  
anfassen

## **Ablauf:**

**Vorwort:** Liebe Kinder, ihr dürft euch gleich selbst testen, wichtig ist, dass alle Gegenstände im Kasten (Ablagefach) bleiben, auch der Müll!

Bitte wascht eure Hände, dann geht es los:

1. Verschluss vom Fläschlein entfernen.
2. Teststreifen öffnen und den Müll liegen lassen.
3. Wattestäbchen öffnen, am langen Stil anfassen, das dicke Ende in den vorderen Nasenbereich einführen und 5mal drehen: zuerst das eine, dann das andere Nasenloch. (wie popeln)
4. Wattestäbchen ins offene Fläschchen stecken und 5mal kräftig rühren und dabei das Stäbchen fest nach unten stoßen. (die Popel wollen schwimmen)
5. Wattestäbchen zum Müll im Ablagefach legen und den Deckel auf das Fläschlein drücken: Stil nach oben!
6. Fläschlein umdrehen, aus dem Stil 3 Tropfen auf den Teststreifen in das kleine runde Loch tröpfeln (fest ausquetschen).

Schüler ist fertig!

**Schlusswort:** Liebe Kinder, das habt ihr großartig gemacht, wir gehen davon aus, dass alle negativ sind! Die Kästen kommen jetzt ins Lehrerzimmer zur Auswertung.

Wenn jemand positiv sein sollte, kommt Frau Münch, begleitet Dich ins Rektorat, wo Du mit ihr zusammen auf Deine Eltern wartest. Du bekommst einen kleinen Elefanten, der Dir ganz viel Kraft gibt, denn Du musst dann sehr mutig mit Deinen Eltern zum großen Testen gehen. Erst dann erfährst Du, ob Du wirklich positiv bist. Keine Angst, es kann sein, dass Du nichts hast und wieder in die Schule kommst, wenn Du etwas hast, erholst Du Dich zu Hause und kommst nach 2 Wochen wieder in die Schule.